

# **Konsung WBC & Hb**

## **Sistema Point of Care per Emocromo**




**Semplice**  
**Veloce**  
**Affidabile**


# Sistema Point of Care per Formula Leucocitaria, Emoglobina Totale ed Ematocrito da Sangue Capillare

**WBC Analyzer:** per la quantificazione dei **leucociti totali** e la **formula leucocitaria**:


- ▷ Linfociti, Monociti, Basofili, Eosinofili, Neutrofil
- ▷ Sistema ad alta tecnologia basato sulla digitalizzazione e analisi d'immagine microscopica
- ▷ Volume di campione: 10  $\mu$ L
- ▷ Tempo di analisi: < 3 minuti

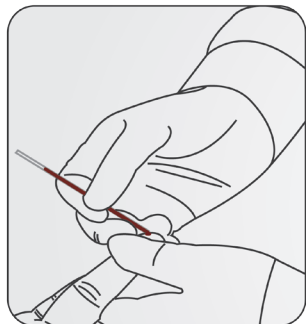


1. prelevare 10  $\mu$ L di sangue capillare

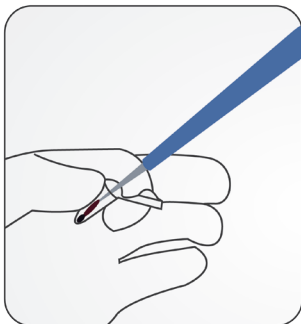

2. miscelare il campione con il colorante

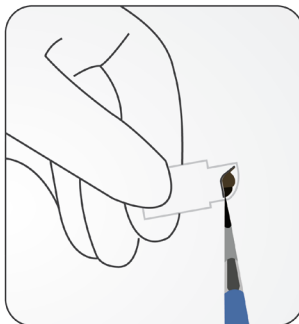

3. trasferire la miscela nella cuvetta di lettura

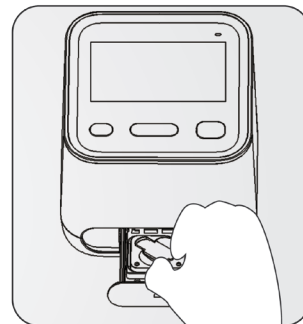

4. inserire la cuvetta nello strumento per la misura

**Hemoglobin Analyzer:** per la quantificazione dell'**Emoglobina Totale** e dell'**Ematocrito**

- ▷ Principio spettrofotometrico
- ▷ Volume di campione: 10  $\mu$ L
- ▷ Tempo di analisi: < 30 secondi



## INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice	Descrizione	Test/Kit
C101	Blood Staining Solution (microcuvette e soluzione colorante per WBC)	25
HB-01	Hb Cuvette (microcuvette per H7-3)	25
H7-3	Hemoglobin Analyzer (analizzatore per emoglobina ed ematocrito)	-
WBC-5	WBC Analyzer, (analizzatore per conta e formula leucocitaria)	-

Distribuito in Italia da

**MINIAS GLOBE DIAGNOSTICS SRL**

Via Ancona 11R - 17100 Savona  
Tel. 019/824844 - Fax. 019/829481  
Email: info@minias.it